

Návod k přípravě vzorků:

As Easy As 1—2—3

Test multiple samples at one time!



1. 1 kapka mléka

2. 3 kapky testovacího média

3. po 45 minutách porovnáme sytost zbarvení
nebo necháme přesněji změřit speciální
čtečkou

Návod k použití pro čtečku somatických buněk Porta

Zmáčkněte levé zapínací modré tlačítko.

Na displeji se objeví symbol 543.

Zastrčte kalibrovací proužek do čtečky (bílým kolečkem dolů).

Až se objeví na displeji symbol proužku s kapkou, proužek vyjměte.

Na displeji se objeví blikající proužek – čtečka je připravena k použití.

Vložte připravený vzorek (viz. výše) kolečkem dolů do čtečky.

Nyní můžete změřit všechny testovací proužky, které máte připraveny.

Kalibraci je nutno znovu provést až při dalším vypnutí.

Přístroj se automaticky vypíná po 2 minutách nečinnosti.

Výsledky z displeje je nutno jednoduše přepočítat:

0,06 = 60 000 somatických buněk v mililitru

0,16 = 160 000 somatických buněk v mililitru

1,15 = 1 150 000 somatických buněk v mililitru

Každou hodnotu nad 0,25 je nutno řešit.

Zprávy na displeji:

LO Počet somatických buněk je menší než 50 000 v mililitru

HI Počet somatických buněk je větší než 3 miliony v mililitru

E2 Testovací proužek byl vyjmut dříve, než ho čtečka stačila přečíst

Modré šipky vedle zapínacího tlačítka slouží k listování v paměti, která si pamatuje jednotlivá měření.

Nemačkejte šipku dolů déle než 5 sekund, jinak bude přístroj překalibrován a bude muset být opraven!

Čištění čidla:

Sundejte černý kryt (odklopením nahoru za místem kam se zastrkávají proužky).

Čidlo očistěte bavlněným hadříkem namočeným v čisté vodě.

K čištění přístroje nepoužívejte přípravky s alkoholem.

Obrázky najdete v anglickém manuálu.

Pro více informací:

MVDr. Martin Vlček

Tel. 775 972 909

E-mail: estrotect@seznam.cz

www.portacheck.com